

D DOCTORAIR

| 取扱説明書 |



イヤラボ

EAR LABO / SEL-01

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

はじめに

安全のために	3
各部の名称と付属品	8
充電する	11

使いかた

イヤラボを使用する	13
-----------	----

その他

お手入れと保管について	15
故障かなと思ったら	16
主な仕様	17
保証とアフターサービス	18

はじめに

安全のために

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について

誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけないこと。



必ず守る

必ず行うこと。

警告



禁止

●次の方は使用しない。

- ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- ・温度感覚喪失が認められる方
- ・睡眠薬等を服用した方及びめいいてい状態の方
- ・耳に疾患のある方、耳周りにトラブルがある方

警告

- 次の方は必ず医師とご相談の上使用する。
 - ・悪性腫瘍のある方
 - ・妊娠初期の不安定期または出産直後の方
 - ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方
 - ・安静を必要としている方や体調がすぐれない方
 - ・体温38℃以上(有熱期)の方
例:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき
 - ・適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある方
 - ・その他、医療機関で治療中の方
 - ・低温やけどをしたことのある方
 - 下記の場合や、耳以外の部位には使用しない。(体調不良、肌トラブルの原因)
 - ・体調がすぐれないとき、発熱しているとき
 - ・使用する部位に傷、湿疹、はれものやニキビなど、肌に異常があるとき
 - ・皮膚炎、過度の日焼けなど肌に異常のある時
 - ・外科手術(形成・美容など)を受けた部位
 - 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所、ペットが触れる場所に保管しない。(誤飲など思わぬ事故を招く原因)
 - 浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しない。(感電の原因)
 - 本体は水洗いしない。(感電やショートによる火災などの原因)
 - 電子レンジや乾燥機などで加熱しない
- ### 充電電池について
- 本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
 - ・加熱や火中投下
 - ・高温環境でのご使用、充電、放置
 - ・こたつや布団に入れてのご使用、充電
 - ・毛布などを被せてのご使用、充電
 - ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電、放置

警告

- 性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
性能の劣化したリチウムイオン電池の使用を続けると、発煙・発火など重大な事故につながる恐れがあります。
- 下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
 - ・電池の膨張・異音・異臭
 - ・充電しても動作しない
 - ・極端に使用時間が短くなった
 - ・充電中に熱くなる

電源について

- 濡れた手で本体やUSBコード、充電ケースには触れない。(感電の原因)
- USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火・火災の原因)
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ぬじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する
- ACアダプタをコンセントから抜くときは、USBコードを引っ張らない。(感電、ショートによる発火・火災の原因)
- 傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいACアダプタは使用しない。

- 使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談する。(ケガ・事故の原因)
- しばらくご使用にならなかった場合は、必ず使用前に操作ボタンやランプ表示、ヒーター機能が正常に動作するか確認する。
- 使用中、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師に相談する。(事故・体調不良の原因)

電源について

- コンセントや配線器具の定格を守る。(定格を超えると、発熱による火災の原因)
- USBコードは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱による火災の原因)



禁止



禁止



必ず守る

⚠ 注意



禁止

- イヤーピースを外した状態で使用しない。(やけどやケガの原因)
- 運転中は使用しない。(思わぬ事故やケガの原因)
- 他の製品、機器などと同時に使用しない。(事故・体調不良の原因)
- 飲酒、食事直後の約30分～1時間は使用しない。(健康を害するおそれ)
- 本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。(発火・感電・故障の原因)
- 医療行為には使用しない。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。(ケガ・故障の原因)



必ず守る

- イヤーアクセサリー類は外して使用する。(事故・ケガの原因)
- 熱いと感じた場合、使用を中止する。(低温やけどの原因)
- 連続して使用しない。(低温やけどの原因)
- 1日の使用は3回までにする。(逆効果・ケガの原因)
- 耳や耳のまわりに湿疹、かぶれ等が現れた場合は、その後の使用を中止し、医師に相談する。
- 熱すぎると感じた場合、痛みや違和感等、身体に何らかの異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。(やけど等のトラブルの原因)
- 使用しないときは必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。(火災・故障の原因)

⚠ 注意



必ず守る

電源について

- 充電用ジャックなどにピンやごみを付着させない。(感電やショートによる火災の原因)
- 収納時に、USBコードを本体などに巻き付けない。
- AC100Vで使用する。
- 異常・故障時に直ちに使用を中止する。ACアダプタ使用時は、コンセントからACアダプタを抜く。(発煙、発火、感電の原因)
異常・故障例：
本体、コードなどが傷んでいたり、変形したり、異常音や異臭・発煙、異常に熱い場合、直ちにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(感電の原因)
- 本体や充電用ジャック、USBコードなどの手入れを定期的に行う。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池残量「中」の状態になってから保管する。(※電池残量表示はP9参照)
- 使用時以外は電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(思わぬ事故の原因)
- 雷が降り始めたら直ちに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(故障の原因)




分解禁止

- 分解・改造は絶対しない。(発火、事故、故障の原因)
- 内蔵充電電池の交換は絶対しない。(発火、事故の原因)


各部の名称と付属品

本体 (耳せん)

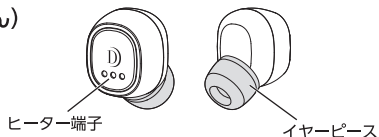

※本体 (耳せん) は音楽など聞くことはできません。

充電ケース

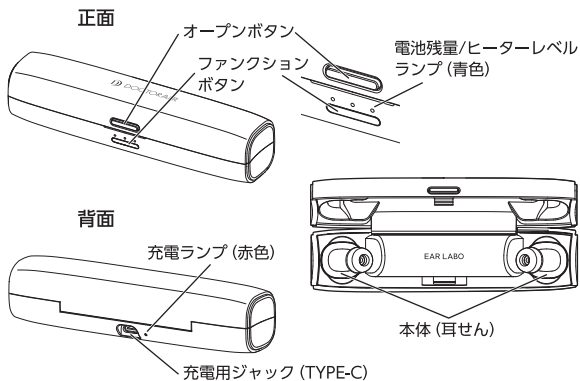

ファンクションボタン

長押し (約3秒) で電源のオン/オフを切り替えます。


電池残量/ヒーターレベルランプ (青色)

電池残量、ヒーターレベルを表示します。

<電池残量表示>

電源オン後、約2秒間電池残量が表示されます。

※電池残量/ヒーターレベルランプ (青色)

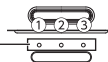

電池残量	ランプ表示
少	①点灯
中	①②点灯
多	①②③点灯


※電池残量によって、ランプは右から順次消灯します。

<ヒーターレベル表示>

電源を入れて約2秒間電池残量が表示された後、前回選択していたヒーターレベルのランプが約3秒間表示されます。

※初めて使用する際は、ヒーターレベル「弱」のランプが約3秒間表示されます。

電池残量/ヒーターレベルランプ (青色)

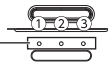

ヒーターレベル	ランプ表示	
	あたたため中	あたたため完了
弱	①点滅	①点灯
中	①点滅 → ①点灯+②点滅	①②点灯
強	①点滅 → ①点灯+②点滅 → ①②点灯+③点滅	①②③点灯

※既に本体 (耳せん) があたたまっている場合は、その時に選択しているヒーターレベルからランプ表示されます。

※5分以内にあたたまります。(ヒーターレベル「強」)


付属品



Sサイズ Mサイズ Lサイズ

イヤピース3種 (S、M、L)

※Mサイズは本体 (耳せん) に装着済み

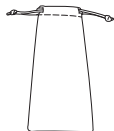

専用ポーチ



USBコード (TYPE-C (A-C))



取扱説明書
(本書・保証書付)


充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

ご注意

- ご使用前に本体 (耳せん) に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- USBコードを束ねた状態で使用しないでください。
- 市販のUSBコードもご使用になれます。市販品をご使用の際は、必ず「56kΩレジスタ (抵抗)」の実装されたUSB TYPE-A to Cコードを使用してください。
- 取扱いを誤ったために生じたACアダプタ等の故障については、当社では責任を負いかねます。

イヤラボを使用する

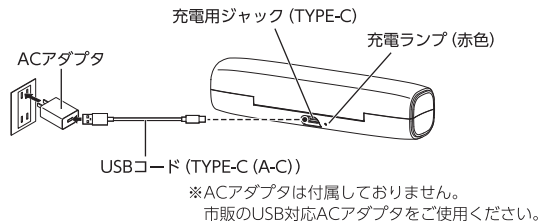

- 1 充電ケースの充電用ジャック (USB TYPE-C) に、付属のUSBコードを接続します。しっかりと押し込んでください。
- 2 USBコードをお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。
※充電が開始され、充電ランプが点灯します。(赤色)
※満充電になると、約3秒経過後に充電ランプが消灯します。
USBコードを引き抜いた際に、約3秒間充電ランプが点灯します。(赤色)
※空の状態から充電完了まで約3時間30分かかります。
※市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5V2A以上のACアダプタを推奨いたします。
※あたため中に充電はできません。
使用方法は「イヤラボを使用する」13ページをご覧ください。
- 3 充電が完了したらACアダプタを充電ケースとコンセントの両方から外してください。

ご使用になる前に

- ご使用前にファンクションボタンや電池残量/ヒーターランプなどが正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」(11ページ)をご覧ください。

- 1 本体 (耳せん) を充電ケースにセットします。
- 2 ファンクションボタンを長押し (約3秒) し、電源を入れます。電源オン後、約2秒間電池残量が表示されます。
- 3 電源を入れて約2秒間電池残量が表示された後、前回選択していたヒーターレベルのランプが約3秒間表示されます。
※初めて使用する際は、ヒーターレベル「弱」のランプが約3秒間表示されます。
- 4 ファンクションボタンを短押しし、ヒーターレベルを調節します。電源オン時、ファンクションボタンを押すたびに、ヒーターレベルは下記の様に切り替わります。
弱→中→強→弱…の繰り返し
- 5 ヒーターランプが全点灯したら、本体 (耳せん) を充電ケースから取り出し、耳に装着します。
• イヤーピースを取り外した状態で使用しないでください。
やけどやケガの原因になります。
• イヤーピースのサイズが合わない場合は、他のサイズに交換してください。
※付け替え方法はP14を参照してください。



お手入れと保管について

お手入れについて

ご注意

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。


本体（耳せん）、充電ケースは乾いた柔らかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、柔らかい布で拭き取ります。その後、乾いた布で乾ばきしてください。

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切り、USBコードを抜いてください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂や洗面所などの水場や湿気が多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、専用ポーチに入れて保管してください。

廃棄する場合は

充電ケースにはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

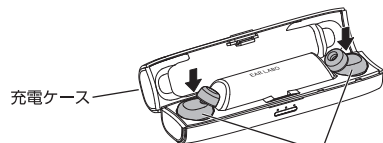

本体（耳せん）

あたたかさは約15分持続します。充電ケースから取り出した後、徐々に常温に近づきます。

※使用環境・使用状況により異なります。

<途中で使用を中止する場合>

本体（耳せん）を充電ケースに収納してください。

※電池残量/ヒーターランプが点灯している場合はファンクションボタンを長押し（約3秒）すると電源がオフになります。

付属のイヤークラスを付け替える

耳の大きさに合わせて、イヤークラスのサイズを付け替えてください。S/M/Lサイズの3種類付属しています。

※Mサイズは本体（耳せん）に装着されています。

より快適にお使いいただくために、イヤークラスのサイズを変えて耳の収まりが良いものに調節してください。

<交換方法>

お使いのイヤークラスを外し、取り付けたいイヤークラスを斜めから押し当て、穴を広げるように押し込み、奥まで入るようにしっかりと取り付けてください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none">周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻ります。動作中にUSBコードを接続しても充電されません。電源オフの状態で充電されます。
ヒーターが温まらない	<ul style="list-style-type: none">充電が十分でない場合、設定温度に達するまでに時間がかかる場合があります。十分に充電を行ってからご使用ください。お使いになる環境によっては、設定温度に達しない場合があります。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

本体

製品名	イヤラボ
型番	SEL-01
電源	充電式(リチウムイオン充電体内蔵3.7V 2000mAh)
定格消費電力 ^{※1}	約7.4W
充電時間 ^{※1}	約3時間30分
充電可能回数 ^{※1}	約300回
あたたかさ持続時間 ^{※1}	約15分(目安)
寸法	本体(耳せん):約W23.6 mm×H19.2 mm×D19.2 mm(突起部含む) 充電ケース:約W146 mm×H34.7 mm×D35.7 mm(突起部含む)
質量	本体(耳せん):約9g 充電ケース:約170g
付属品	イヤピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C(A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質	本体:ABS 充電ケース:ABS、シリコン
設定温度 ^{※1}	弱:約38℃ 中:約43℃ 強:約48℃ (環境温度25℃時(温度の目安))
使用環境温湿度	+10℃～+40℃ 85%RH以下
保管環境温湿度	-10℃～+85℃ 85%RH以下
生産国	中国
対応ACアダプタ ^{※2}	定格出力:DC5V 2A以上推奨

※1記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。

※2 ACアダプタは付属しておりません。

市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

保証とアフターサービス

使い方・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。

また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(16ページ)をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- ・お買い上げ日
- ・製品型名: SEL-01
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関するお問い合わせ



保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間: 保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料: 診断、修理、調整、点検などの費用
- ・部品代: 修理に使用した部品および補助材料代
- ・修理品の運賃: 修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間


本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。

保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスをご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

愛情点検のお願い

長年ご使用のイヤラボの点検をお願いします	
 愛情点検	<input type="checkbox"/> こんな症状はありませんか？ <ul style="list-style-type: none">● 煙が出たり、異常なおいや音がする● USBコードを動かすと、通電したりしなかつたりする● 内部に異物や水が入った● 本体に変形や破損がある● その他異常がある
	<input type="checkbox"/> ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様相談窓口にて点検、修理をご相談ください。

無料保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)などはお客様のご負担となります。
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けになれない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - (1)取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - (2)不当な修理や改造による故障および損傷
 - (3)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - (4)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - (5)保証書のご提示がない場合
 - (6)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (7)車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (8)火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - (9)弊社(および弊社関連会社)以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - (10)消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - (11)磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。